

МАССАЖНОЕ
КРЕСЛО

Excellence

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

bodo

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор массажного кресла **Bodo Excellence**, которое позаботится о вашем здоровье и теле. Пожалуйста, прочтите внимательно данное руководство пользователя перед применением, чтобы понимать все его функции. Строго соблюдайте требования техники безопасности. Сохраните и запомните эти инструкции!

Примечание: технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Все изображения, представленные в руководстве, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках, включая цвета, размеры и формы.

СОДЕРЖАНИЕ

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	6
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ	6
ОПИСАНИЕ МАССАЖНОГО КРЕСЛА	9
СБОРКА МАССАЖНОГО КРЕСЛА	11
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАССАЖНОГО КРЕСЛА	16
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	17
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	18
ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ	19
УХОД И ХРАНЕНИЕ	28
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	29
СПЕЦИФИКАЦИЯ	29
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	30



ВНИМАНИЕ

Неправильная эксплуатация может стать причиной травм

- Обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом перед использованием массажного кресла в следующих случаях:
 - ✓ установлены кардиостимуляторы или другие подобные устройства
 - ✓ есть протезы или другие имплантируемые медицинские детали в теле
 - ✓ страдаете хроническим заболеванием сердца, заболеванием кровеносных сосудов, повышенным или пониженным кровяным давлением
 - ✓ страдаете диабетом, острым варикозом, флебитом или тромбозом
 - ✓ страдаете заболеваниями позвоночника или имеются травмы позвоночника
 - ✓ страдаете мышечной гипотонией, слабые мышцы, суставы или худощавое телосложение
 - ✓ при онкологии и большинстве видов доброкачественных опухолей
 - ✓ при парестезии
 - ✓ при кинетозе и слабом вестибулярном аппарате
 - ✓ при тендовагините и остеопорозе
 - ✓ беременны, недавно родили, а также во время менструаций
 - ✓ имеются заболевания кожи или предрасположенность к ним
 - ✓ имеется заболевание воспалительного характера и высокая температура тела
 - ✓ недавно перенесли операцию, проходите курс лечения и испытываете дискомфорт
 - ✓ при любых почечных заболеваниях
- Массажное кресло предназначено только для взрослых.
- Использование массажного кресла людям преклонного возраста, лицам с психическими расстройствами и инвалидам допускается только под строгим контролем опытного инструктора, ответственным за безопасность.
- Если во время массажа вы почувствуете недомогание, головокружение или тошноту, немедленно прекратите использование массажного кресла и проконсультируйтесь с врачом.
- Не пытайтесь массировать колени и живот, будьте осторожны при массаже шеи и головы.
- Используйте розетку только с заземлением.
- Массажное кресло предназначено для некоммерческого использования в домашних условиях, а не для медицинского лечения.



ЗАПРЕЩЕНО

Неправильная эксплуатация может стать причиной травм и повреждения оборудования

- Использовать массажное кресло в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или после употребления различных лекарств, которые могут вызывать сонливость, подавленное состояние, повысить или понизить кровяное давление.
- Использовать кресло с высокой температурой тела, а также если ваше тело влажное.
- Использовать кресло несколькими людьми одновременно.
- Засыпать и спать в массажном кресле.
- Сгибать и деформировать массажные ролики.
- Пользоваться неисправным или поврежденным шнуром питания, вилок или розеткой.
- Сильно сгибать, скручивать, сжимать, завязывать узлы в шнуре питания, ставить на шнур тяжелые предметы.
- Самостоятельно разбирать, пытаться отремонтировать или вмешиваться в устройство кресла.
- Сидеть, вставать, а также класть посторонние предметы на спинку, массажный блок для ног и подлокотники кресла.
- Вставать на кресло во время массажа.
- Перемещать работающее кресло.
- Использовать кресло, если перекрыты вентиляционные отверстия. Не допускайте попадания в них ворса от ковра, волос и других блокирующих вентиляционные отверстия предметов.
- Выключать питание и вытаскивать шнур питания во время массажа.
- Использовать кресло вне помещения и в местах прямого попадания солнечных лучей.
- Использовать кресло с заколками и украшениями для волос, браслетами, часами и другими предметами одежды, которые могут нанести травму во время массажа. В карманах вашей одежды не должно находиться твердых предметов.
- Использовать медицинские или косметические кремы во время массажа.
- Использовать массажное кресло на голое тело во избежание раздражения и ожога кожи. Обязательно производите массаж через тонкую ткань для достижения наилучшего эффекта.
- Использовать и хранить массажное кресло в помещениях с повышенной влажностью (бассейн, ванная, душевая и др.), в сильно запыленных местах, тесных помещениях, рядом с кондиционером или разогретыми предметами.
- Использовать массажное кресло, если оно повреждено, произошел механический или электронный сбой. В таких случаях незамедлительно обратитесь в сервисную службу.
- Держать массажное кресло работающим вхолостую в течение длительного времени.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Дополнительная информация и предостережения по безопасности


- Максимальная грузоподъемность массажного кресла составляет 150 кг.
- Перед использованием массажного кресла убедитесь, что рядом нет детей, домашних животных или посторонних предметов.
- Пользуйтесь креслом, только если оно установлено на ровной поверхности.
- Перед тем, как сесть в кресло, проверьте, чтобы все массажные ролики находились в правильном положении.
- Рекомендуемое время использования массажного кресла — 20 минут в день. Начинать всегда с самого легкого массажа, постепенно меняя его интенсивность. Длительный массаж (более 5 минут) в одном положении или области тела может вызвать дискомфорт.
- Во избежание дискомфорта, не используйте массажное кресло сразу после еды.
- Избегайте попадания рук или ног между массажными роликами и в пространство между механическими частями кресла во время его работы.
- Если из массажного кресла слышен необычный звук или шум, выключите его и немедленно отключите питание. Обратитесь в сервисную службу.
- Не берите пульт управления влажными руками и не кладите на него посторонние предметы.
- Не используйте другое терапевтическое оборудование совместно с этим массажным креслом.
- Не курите при использовании массажного кресла.
- Если массажное кресло не используется, выключите питание и извлеките вилку из розетки.
- Извлекая вилку из розетки, держитесь за вилку, а не за шнур питания. Кроме того, не включайте и не отключайте шнур питания мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Данное кресло не предназначено для медицинского использования.
- Не пользуйтесь креслом при грозе и молнии.
- Кресло снабжено функцией подогрева, поэтому особое внимание при работе с креслом следует уделять людям с повышенной чувствительностью к теплу.


УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

- Массажное кресло хранят в упаковке производителя в сухих крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей.
- Условия хранения: в крытых помещениях при температуре не ниже +5°C и относительной влажности воздуха от 45 до 75%.
- Транспортировка массажного кресла осуществляется в транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта.

ОПИСАНИЕ МАССАЖНОГО КРЕСЛА

Массажное кресло — это устройство бытового назначения для использования в квартире, доме или офисе, предназначенное для проведения аппаратного массажа. Результатом работы является так называемый роботизированный массаж. Устройство совмещает в себе кресло для сидения и механизмы, приводящиеся в движения различными способами, осуществляющими массажный контакт с телом человека.

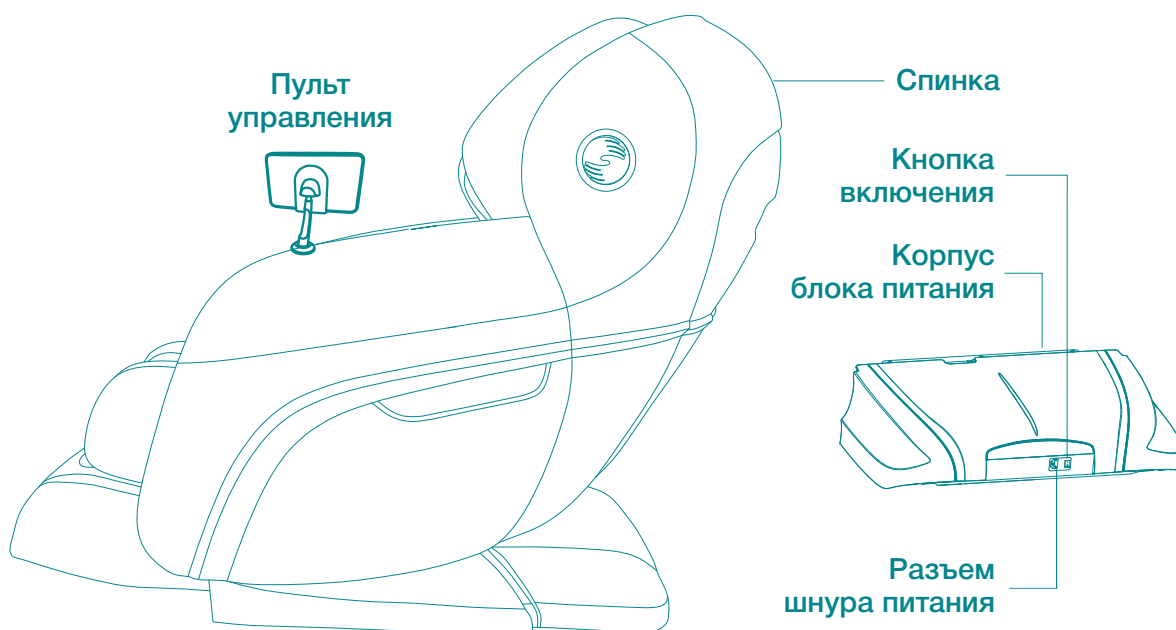


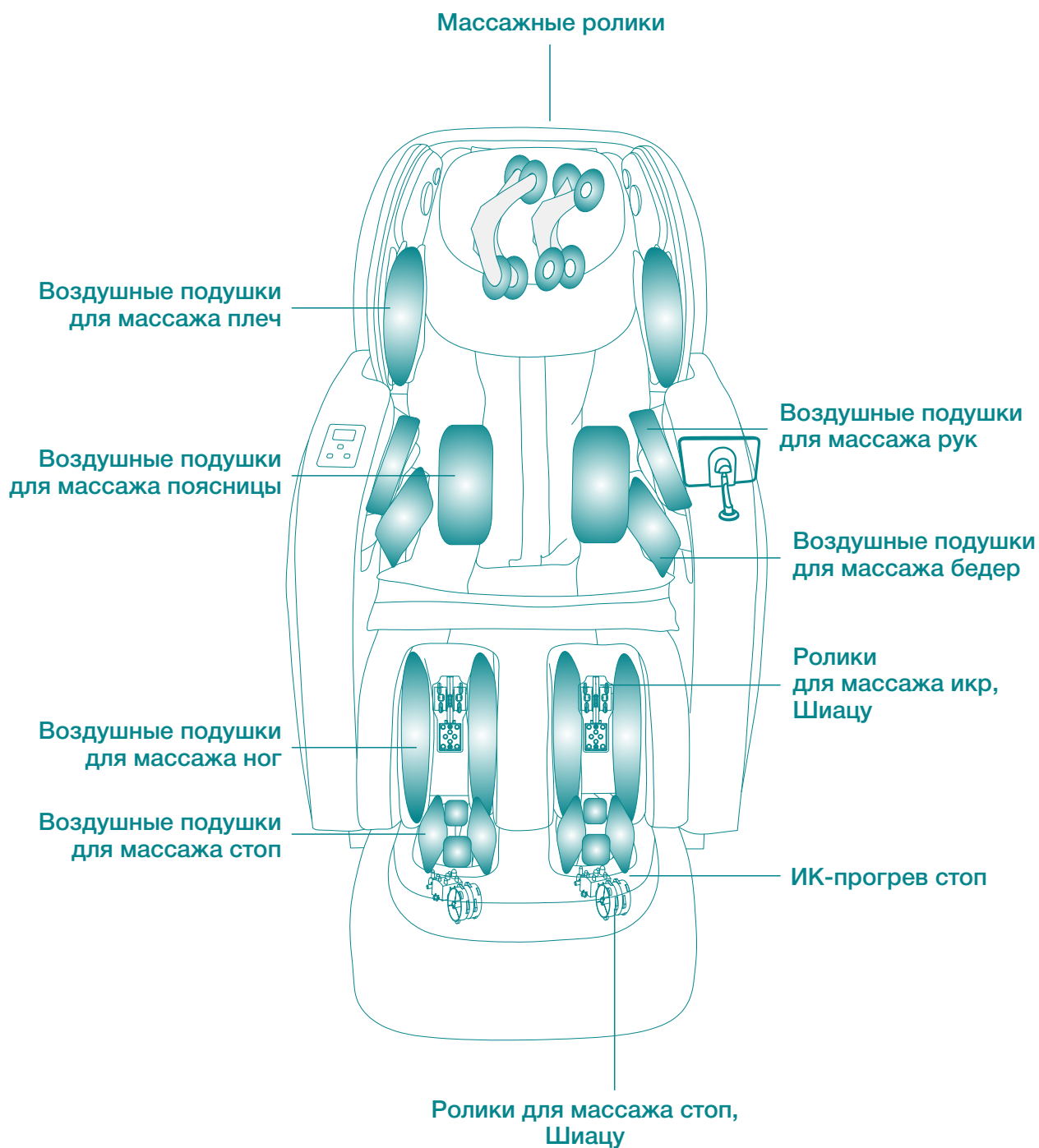

Шаг 1

Достаньте из коробки сначала все комплектующие массажного кресла: *подголовник, подушку для плеч, спинки и сиденья кресла, пульт управления, держатель для пульта, а также провода.* Кресло комплектуется набором для сборки. Проверьте комплектность.


При помощи 3-х или более человек достаньте корпус массажного кресла. Доставать необходимо медленно и осторожно!

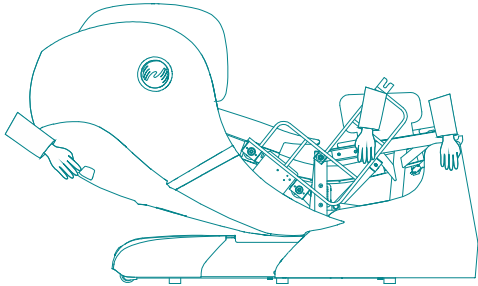

Двое берутся за правую и левую часть каркаса, а третий - за ручку на спинке кресла. Доставать и переносить следует медленно и осторожно

Аккуратно достаньте левый и правый подлокотники из коробки и положите на стол или пол, чтобы не повредить их. Брать подлокотник нужно обеими руками за левую и правую часть.


Достаньте массажный блок для ног, удерживая его за левую и правую стороны, как показано на рисунке, поставьте на ровную поверхность. Делайте это медленно и осторожно во избежание повреждений.

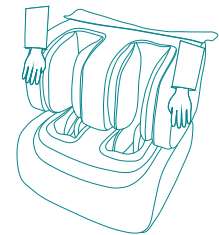


Шаг 2

Крепление массажного блока для ног к корпусу кресла.

Выкрутите винт из кронштейна на корпусе массажного кресла.

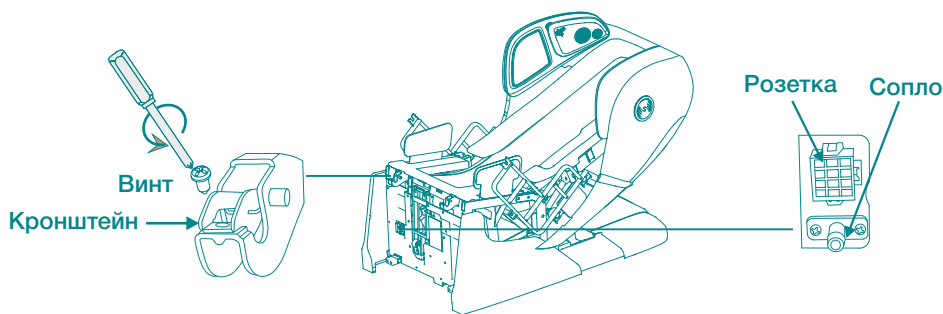


Плотно подсоедините воздушную трубку массажного блока для ног к соответствующему соплу на корпусе. Плотно вставьте разъем шнуров питания в розетку на корпусе кресла.

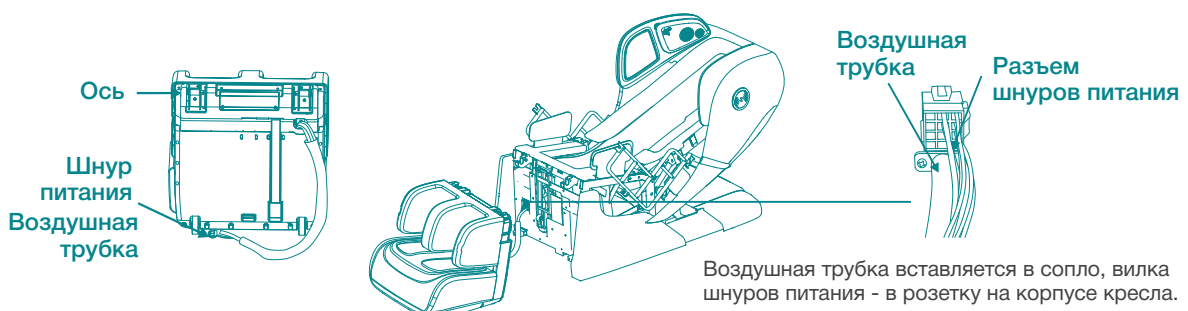


СБОРКА МАССАЖНОГО КРЕСЛА


Поднимите массажный блок для ног и совместите ось с кронштейном.

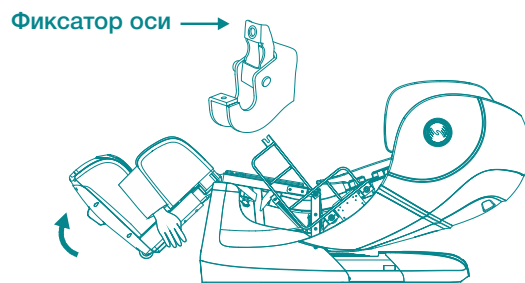

Опустите фиксатор оси и закрутите винт.

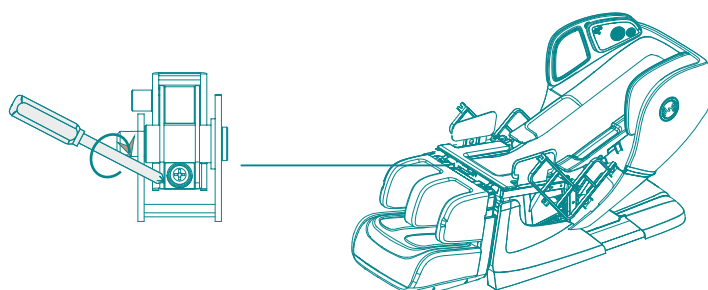

Соедините кожаную часть массажного блока для ног с сиденьем при помощи застёжки.

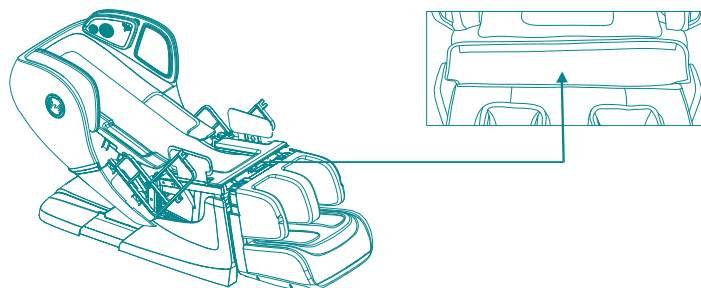

Шаг 3

Установка подлокотников.

Возьмите подлокотник и вставьте его в подвижную стойку корпуса кресла.




Плотно вставьте разъем шнуров питания в розетку.




Подсоедините воздушные трубки подлокотника к соплам на корпусе кресла. Черную трубку необходимо соединить с соплом под номером 1, серую – с номером 2

Вставьте крепежную пластину задней части подлокотника в отверстие для фиксации на корпусе кресла.

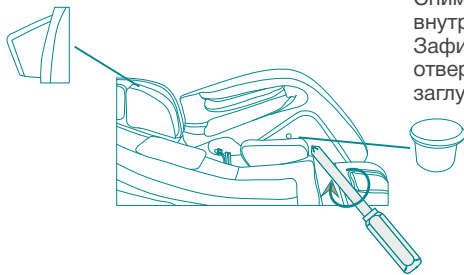

Снимите резиновую заглушку с внутренней части подлокотника. Зафиксируйте винты внутри отверстия, затем вставьте заглушку обратно.

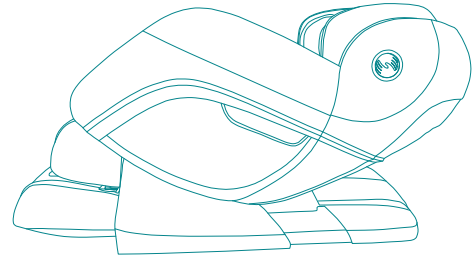

ВНИМАНИЕ


Убедитесь, что воздушные трубки и провод не скручены между собой и не пережаты. Проверьте качество всех соединений и что крепежная пластина плотно вставлена и хорошо удерживает подлокотник во избежание его падения.

Шаг 4

Установка пульта управления.

а) Установите держатель пульта управления в специальное гнездо левого подлокотника. Для правильной установки держателя в подлокотнике предусмотрены особые пазы.


б) Затяните с внутренней стороны подлокотника винт с накатанной головкой М6х16, чтобы зафиксировать держатель.

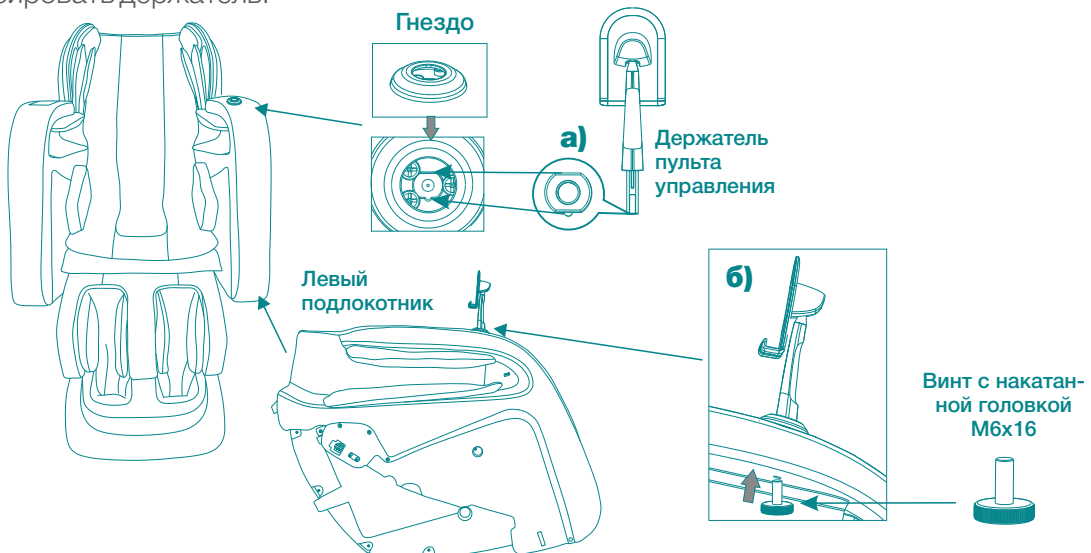

СБОРКА МАССАЖНОГО КРЕСЛА

в) Поместите пульт управления в держатель.

г) Протяните провод пульта управления через кабель-канал левого подлокотника и вставьте штекер пульта управления в соответствующий разъем. Обратите внимание на выпуклый и вогнутый рельеф обоих разъемов — это своеобразный ключ для правильного подключения, чтобы соединительные контакты в разъемах совпадали. Затяните фиксирующую гайку в соединении.

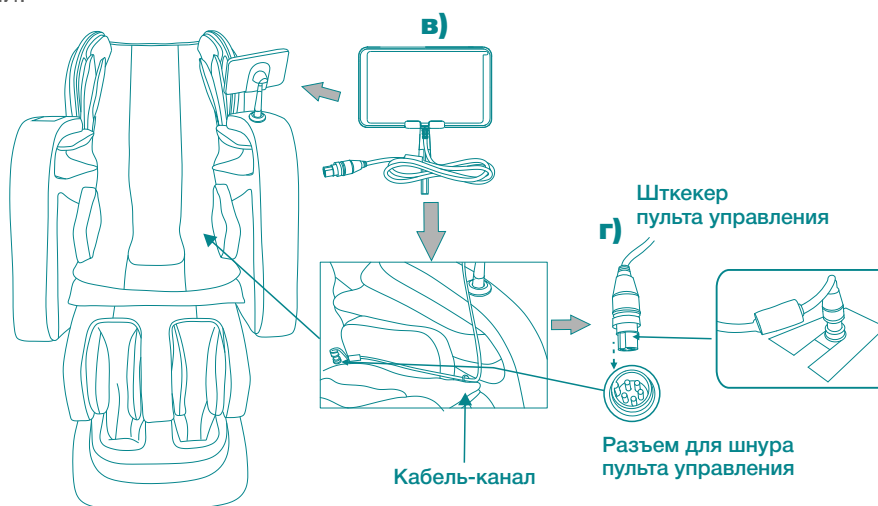


Шаг 5


Установка подушки спинки и сиденья кресла, подушки для плеч, подголовника.

Подушка спинки и сиденья кресла соединяется со спинкой кресла молнией. Поместите подушку для плеч и подголовник на подушку спинки, соедините их при помощи молнии и застежки.

4. Соедините подушки между собой при помощи застежек.

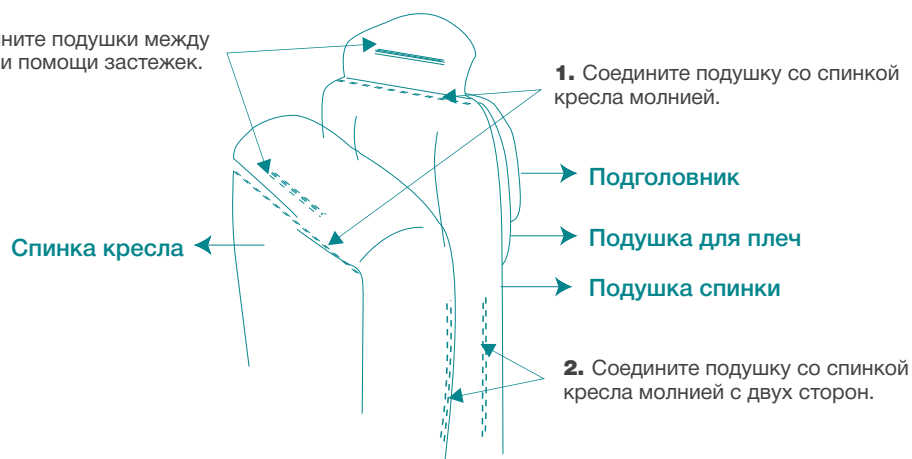


ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения более точных данных при сканировании вашего тела перед запуском программы массажа, располагайте нижний край подголовника на уровне ушей.

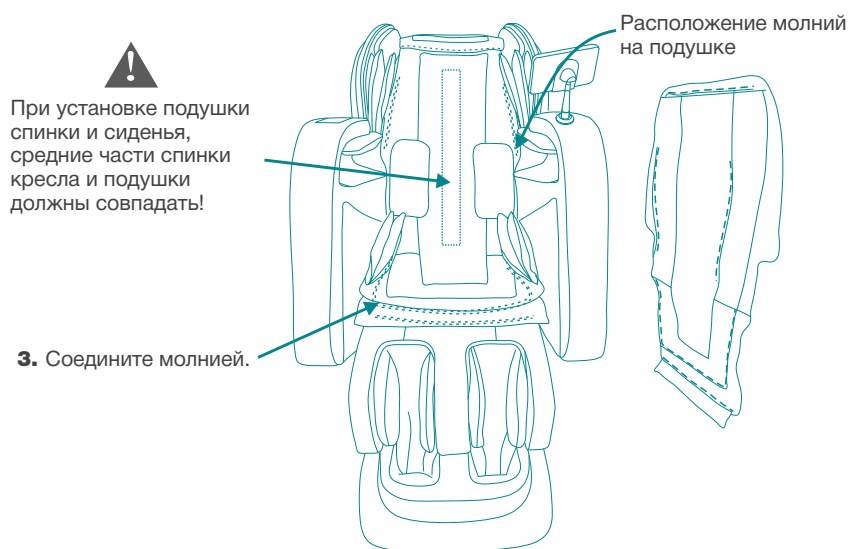

Шаг 6

Включение кресла.


Вставьте штекер шнура питания в соответствующий разъем на корпусе блока питания.

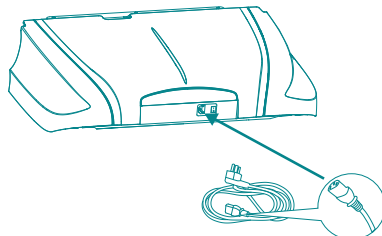

Вставьте вилку шнура питания в розетку. Нажмите на переключатель сзади блока питания (I/O, нажмите на I, чтобы включить).



Нажмите на панели управления кнопку Вкл/Выкл, чтобы привести кресло в вертикальное положение.

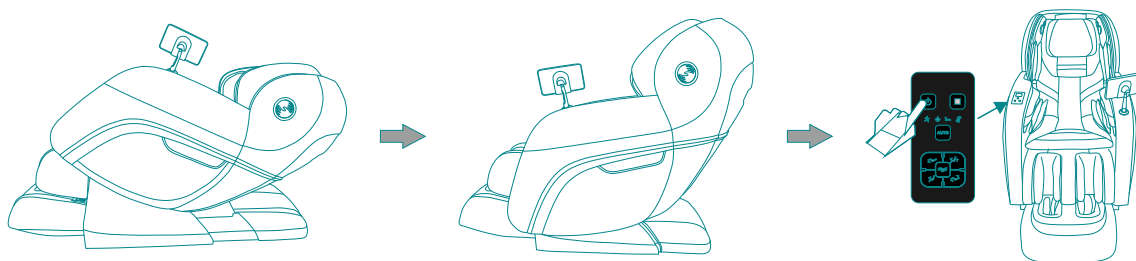


ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАССАЖНОГО КРЕСЛА

Массажное кресло оборудовано колесиками в нижней части для перемещения. Максимально поднимите спинку кресла.

Выключите массажное кресло переключателем «Вкл/Выкл» (положение «О») в нижней части кресла. Достаньте вилку шнура питания из розетки и положите провода питания и пульта управления на сиденье во избежание повреждений.

Для перемещения кресла вам необходимо будет его сначала наклонить и поставить на колесики при помощи двух или более человек.

Поднимите переднюю часть кресла, как показано на рисунке. Удерживая его за верхнюю часть с центром тяжести на колесиках, переместите с помощью колесиков до места установки. Осторожно придайте креслу ровное положение.

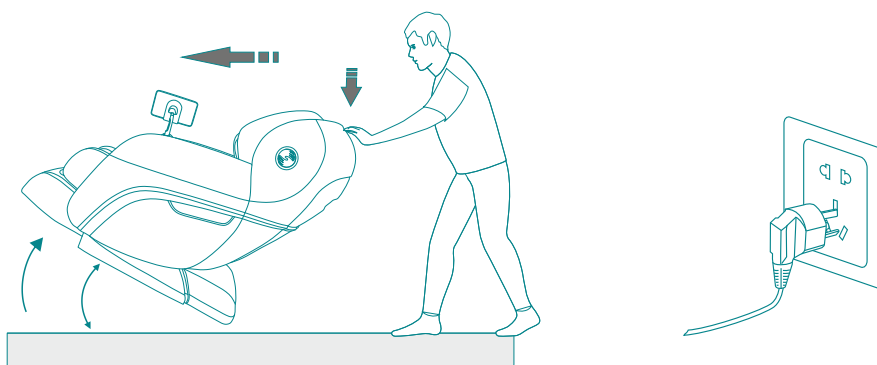


ВНИМАНИЕ

- Не перемещайте кресло с помощью колесиков на деревянной или другой поверхности, которую легко повредить. Для перемещения кресла вам необходимо его поднять с помощью трех или более человек, удерживая за основание в передней части и спинку в задней части.
- Не перемещайте кресло вместе с людьми, а также когда оно складывается или раскладывается.
- Не держитесь за подлокотники во время перемещения.
- Перед включением кресла убедитесь в отсутствии повреждений в шнуре электропитания и пульта управления.
- Убедитесь, что переключатель питания выключен (положение «О») перед подключением кресла к электросети

Перед началом использования массажного кресла удостоверьтесь, что кресло установлено правильно на ровной поверхности и для его раскладывания имеется свободное пространство (не менее 10 см от стены или других предметов позади кресла и не менее 50 см впереди кресла).

Чтобы кресло не создавало помех в работе электроники, размещайте его на расстоянии не менее 1 метра от телевизора, радиоприемника и другой аудио/видео аппаратуры.

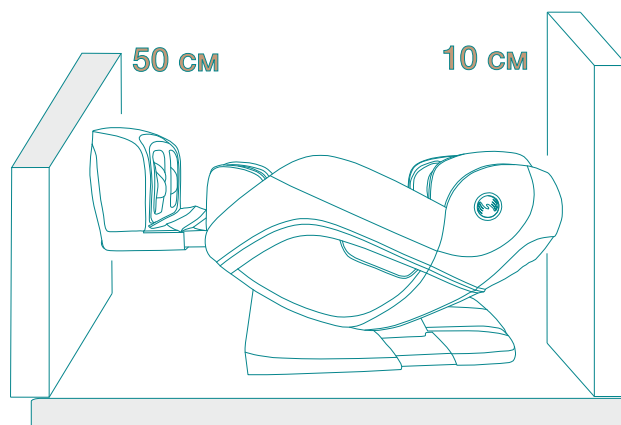

Рекомендуется устанавливать кресло на защитный коврик, чтобы избежать повреждения напольного покрытия.


Перед использованием массажного кресла убедитесь, что имеется достаточно свободного места для его раскладывания. Удостоверьтесь, что рядом с креслом нет детей, домашних животных или посторонних предметов.

Включите питание массажного кресла, нажав на переключатель «Вкл/Выкл» в положение «I». Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» на пульте управления, выберите необходимую программу массажа и ее длительность.



ВНИМАНИЕ

- Избегайте попадания конечностей и прочих предметов между сиденьем и массажным блоком для ног, а также в пространства между механическими частями кресла во время его работы.
- Перед тем, как сесть в кресло, убедитесь, что массажный блок для ног максимально опущен и хорошо закреплен.
- Убедитесь, что кресло находится в исходном положении, в противном случае, для придания креслу исходного положения, выключите и включите питание.
- Не садитесь в кресло, если массажный блок для ног поднимается.
- Не оказывайте резких чрезмерных нагрузок на массажный блок для ног во избежание его повреждения.
- После использования выключите кресло переключателем «ВКЛ/ВЫКЛ» (в положение «O») в нижней части кресла и извлеките вилку шнура питания из розетки.
- Надлежащим образом храните массажное кресло, если не предполагается его использование в течение длительного времени.

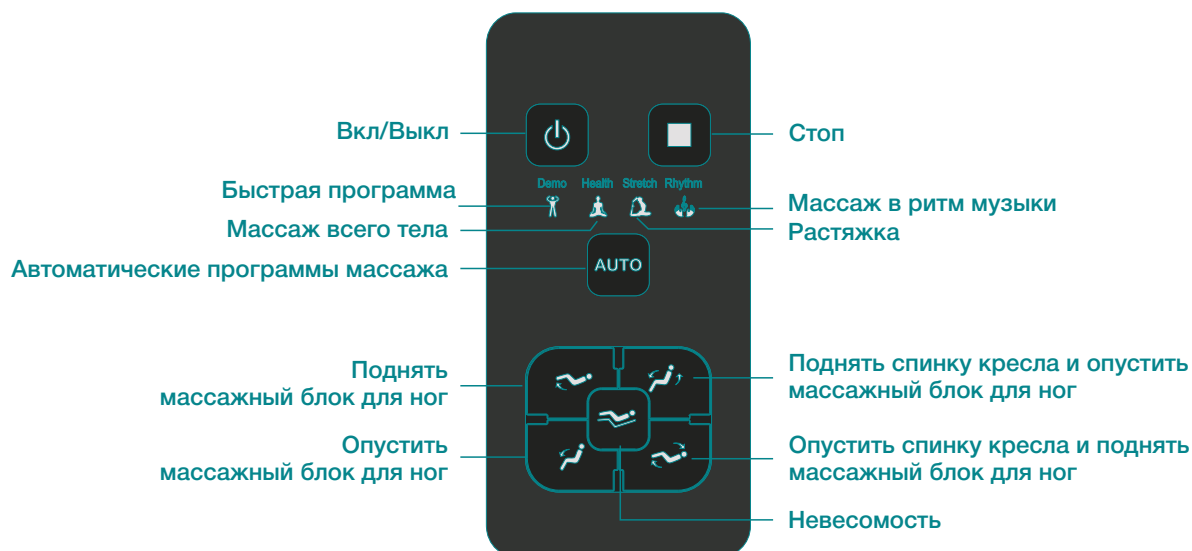

1. Кнопка «Вкл/Выкл»

включает и выключает все функции массажного кресла

Нажмите эту кнопку, чтобы кресло вышло из режима ожидания. Нажмите кнопку еще раз - массажный механизм вернется в исходное положение, массажный блок для ног опустится, спинка кресла поднимется максимально вверх - кресло выключится.

2. Кнопка «Стоп»

приостанавливает все функции

Если вы хотите продолжить сеанс массажа, повторно нажмите кнопку «Вкл/Выкл».

3. Кнопка «Авто»

Когда кресло включено, нажмите эту кнопку, чтобы выбрать или изменить автоматическую программу массажа:

 - быстрая программа массажа, продолжительность 8 минут

 - общий массаж тела, продолжительность 20 минут

 - растяжка, продолжительность 20 минут

 - массаж в ритм музыки, продолжительность 20 минут

4. Кнопка «Поднять массажный блок для ног»

Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы поднять массажный блок для ног. Отпустите кнопку, чтобы остановить подъем.

5. Кнопка «Опустить массажный блок для ног»

Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы опустить массажный блок для ног. Отпустите кнопку, чтобы остановить его движение.

6. Кнопка «Поднять спинку кресла и опустить массажный блок для ног»

Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы одновременно поднять спинку кресла и опустить массажный блок для ног. Отпустите кнопку, чтобы остановить их движение.


7. Кнопка «Опустить спинку кресла и поднять массажный блок для ног»

Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы одновременно опустить спинку кресла и поднять массажный блок для ног. Отпустите кнопку, чтобы остановить их движение.

8. Кнопка «Невесомость»

Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать 1 из 2 режимов «нулевой гравитации» или вернуть кресло в исходное положение.

Верхняя грань пульта управления (планшета)

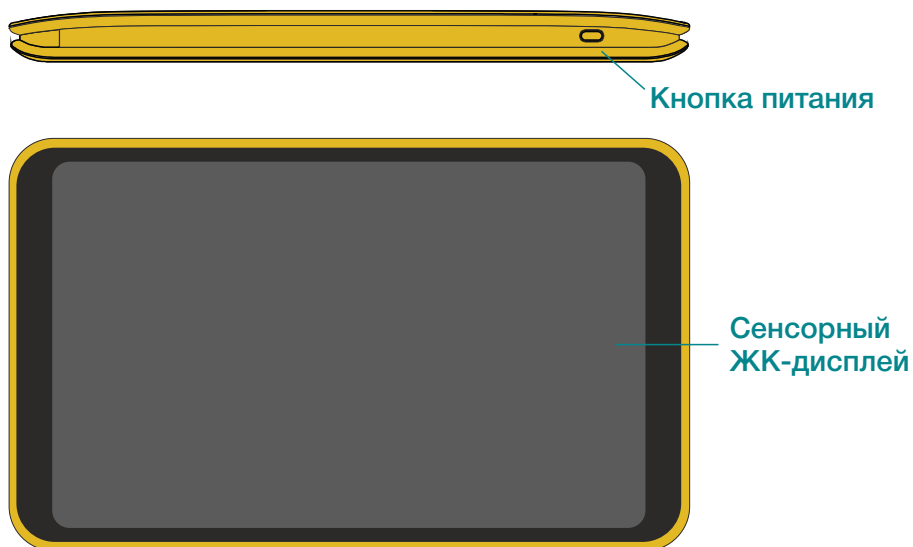

Когда кресло подключено к электросети, нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку питания — загорится и станет активным экранное меню пульта управления. Выберите необходимую программу массажа и ее длительность.

Главный экран



ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ

Нажмите кнопку «Вкл/Выкл», чтобы выбрать автоматическую, специальную или программу массажа ручного режима. После выбора программы кресло начнет автоматически раскладываться и сканировать тело для определения акупунктурных точек и позиции плеч. Дождитесь окончания сканирования. Если по окончании сканирования массажные ролики установились не на уровне плеч, отрегулируйте их позицию вручную с помощью стрелок «Настройка высоты плеч».


Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» еще раз, чтобы выключить массажное кресло. Массаж прекратится, массажные ролики, спинка кресла и массажный блок для ног вернуться в свое исходное положение, а на ЖК-дисплее пульта управления отобразится главный экран меню.









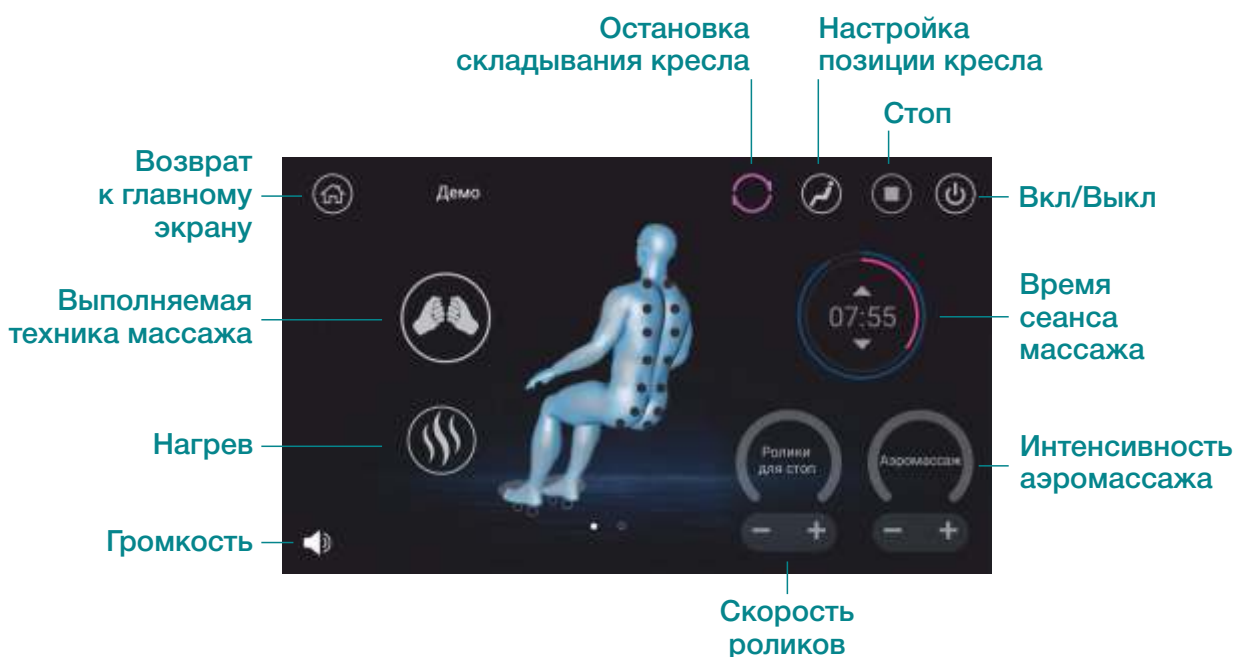







Модель массажного кресла Bodo Excellence предусматривает 12 автоматических программ для вашего приятного расслабления: 4 стандартные программы - *Демо, Растяжка, Общая, Здоровье*; 8 специальных программ - *Комфорт, Релакс, Восстановление, В ритм музыки, Тонус, Йога, Спорт, Деликатная*, а также 5 программ массажа ручного режима - *Разминание, Поколачивание, Постукивание, Разминание с поколачиванием, Шиацу*.


АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ МАССАЖА

Экран запущенной автоматической программы



-  Включает и выключает все функции массажного кресла
-  Возврат к главному экрану
-  Настройка громкости, отображается в каждом интерфейсе ЖК-дисплея пульта управления
-  Останавливает складывание массажного кресла в исходное положение
-  Экстренная остановка всех функций массажного кресла
-  Разминание
-  Постукивание
-  Поколачивание
-  Шиацу
-  Включает и выключает функцию прогрева спины и стоп
-  Таймер текущего сеанса массажа, стрелками вверх или вниз можно изменять ее длительность
-  Роликовый массаж стоп с 2-я уровнями интенсивности
-  Воздушно-компрессионный массаж с 5-ю уровнями интенсивности. Минимальный уровень интенсивности аэромассажа в автоматических программах – 1, в программах массажа ручного режима – 0 (выкл)
-  Настройка угла наклона спинки массажного кресла, массажного блока для ног и позиции невесомости

Экран настроек позиции массажного кресла

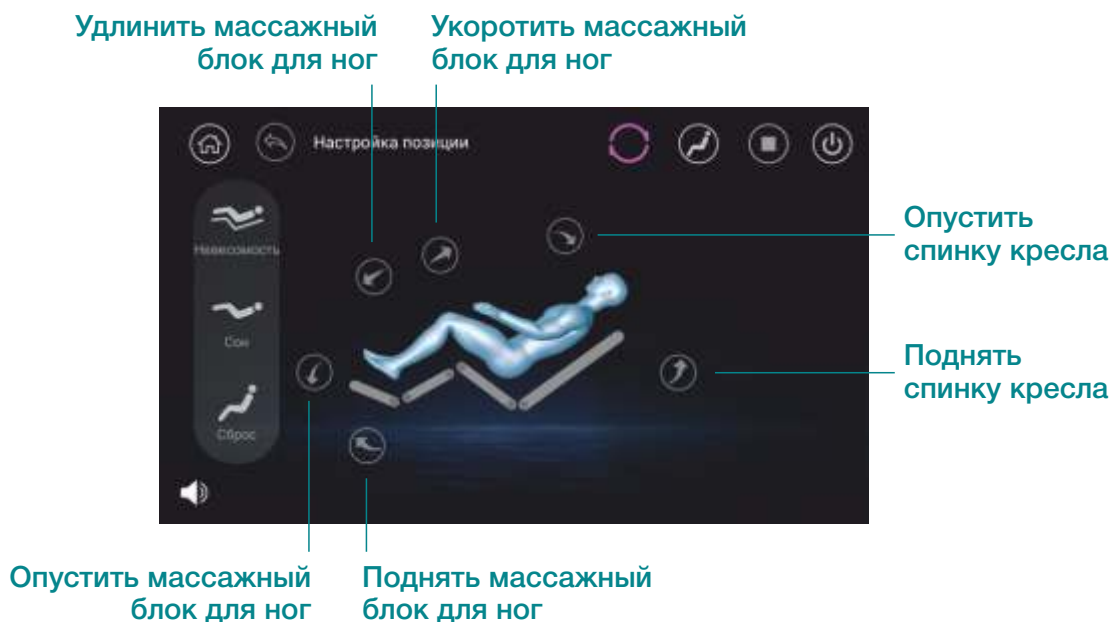

- Переключение режимов «нулевой гравитации»
- Разложить кресло в максимально горизонтальное положение
- Возврат позиции кресла в полностью вертикальное положение
- Возврат к предыдущему меню дисплея

Примечание: невесомость (позиция «нулевой гравитации») — это особый режим работы массажного кресла, при котором тело человека принимает максимально расслабленное положение, при этом усиливается массажный эффект. Голова и ноги находятся практически на одном уровне, тело и ноги расположены под определенным углом — в таком положении нагрузка равномерно распределена по всему телу, и оно максимально расслаблено.

Экран выбора специальных автоматических программ

Специальные автоматические программы массажа включают в себя: *Комфорт, Релакс, Восстановление, В ритм, Тонус, Йога, Спорт, Деликатная.*



ПРОГРАММЫ МАССАЖА РУЧНОГО РЕЖИМА

Экран выбора программ массажа ручного режима

Программы массажа ручного режима включают в себя: *Разминание, Поколачивание, Постукивание, Разминание с поколачиванием, Шиацу.*



Экран настроек программ массажа ручного режима

В программе массажа ручного режима зайдите в меню «Настройки», чтобы кнопками «+» или «-» изменить силу (4D) и скорость массажа, ширину (охват) массажных роликов, интенсивность аэромассажа, скорость роликового массажа стоп.



Экран настройки зоны массажа в программе массажа ручного режима

В программе массажа ручного режима зайдите в меню «Выбор зоны» и измените настройку на «Все тело», «Область» или «Точка», чтобы запустить массаж всего тела, в определенной зоне (области тела) или точке соответственно.



Расположите массажные ролики в нужной вам области или точке, используя кнопки изменения позиции «Вверх» или «Вниз». Для возврата к меню выбора массажа всей спины и тела, повторно нажмите на кнопку «Точка» или «Область».



Экран настройки функции прогрева в программе массажа ручного режима

В программе массажа ручного режима зайдите в меню «Нагрев» и запустите прогрев спины массажными роликами или прогрев стоп.



Экран настройки аэромассажа в программе массажа ручного режима

В программе массажа ручного режима зайдите в меню «Аэромассаж» и запустите воздушно-компрессионный массаж всего тела «Все тело» или в определенной области: «Плечи и руки», «Талия и бедра», «Ноги и стопы».



ТЕСТ ЗДОРОВЬЯ

Интерфейс экрана при тестировании здоровья


ВНИМАНИЕ: перед началом тестирования убедитесь, что массажное кресло подключено к интернету по беспроводной сети Wi-Fi.

Для подготовки к тестированию сядьте в кресло поудобнее и поместите указательный палец в устройство диагностики. Нажмите «Старт». Глубокое и ровное дыхание позволит расслабиться и добиться наиболее правильных результатов теста.




Тестирование длится около 40 секунд, во время которого на экране дисплея будет отображаться частота пульса, данные о насыщении крови кислородом (сатурация), данные о микроциркуляции.

ВНИМАНИЕ: отображаемые результаты тестирования носят информативный характер и не являются официальными результатами медицинских тестов.

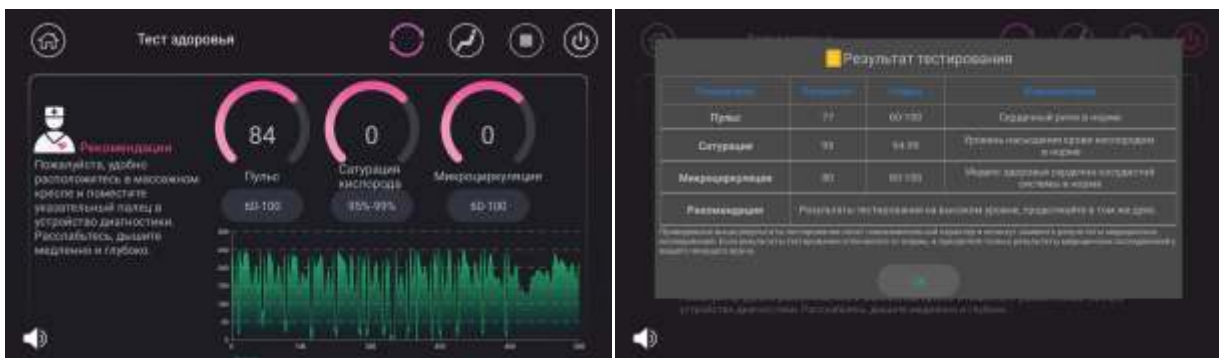

Если во время тестирования произошел сбой и не удалось получить данные, повторите тест, стараясь максимально плотно прижать указательный палец к считывающему сенсору устройства диагностики.

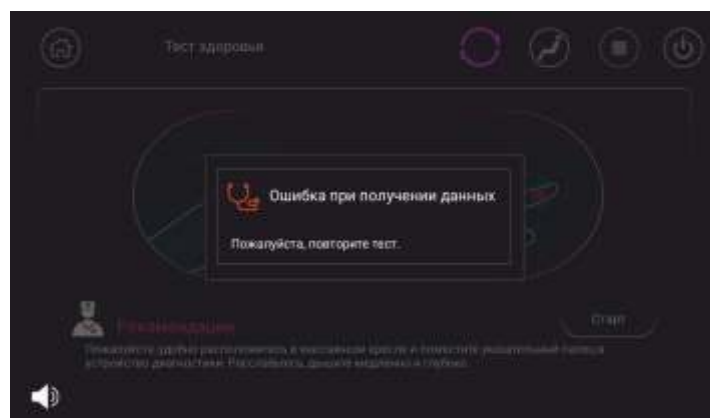

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

Нажмите на главном экране «Другие» и выберите дополнительные опции массажного кресла, такие как: функцию ионизации — «Ионизатор», фототерапии — «Фототерапия», прослушивания музыки или просмотра видео — «Медиа».



Настройка беспроводного подключения к интернету



Настройка громкости звука при нажатии кнопок меню




Выбрать язык интерфейса

Зайдите в меню «Обновление», чтобы проверить текущую версию программного обеспечения и при необходимости обновить.




Тестирование здоровья

Массажное кресло имеет функцию тестирования здоровья, в процессе выполнения которого на экране дисплея отображается частота сердечного ритма, данные о насыщении крови кислородом (сатурация), данные о микроциркуляции. По результатам тестирования создается отчет о проверке здоровья с комментариями и рекомендациями.

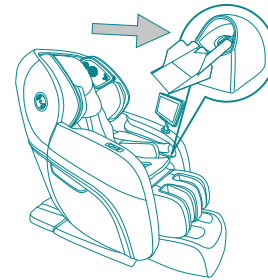


Изменение длины массажного блока для ног

Массажный блок для ног может автоматически сжиматься и выдвигаться вперед в диапазоне до 22 см.

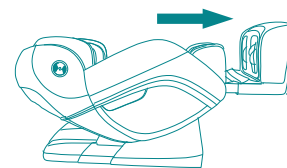


Сочетание массажа спины и бедер

Кресло снабжено технологией 4D Curved Rail, делающей доступным комбинированный массаж бедер и спины. Данная технология позволяет получить максимальный эффект от массажа, в отличие от традиционных форм кареток.

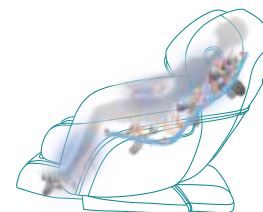

Растирающий массаж ног

Инновационный массажный механизм в области икр позволяет одновременно разминать и растирать мышцы ног, расслабляя и снимая с них усталость.

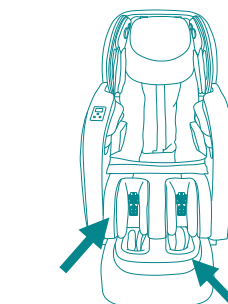


Прогревающий массаж стоп

Роликовый механизм для разминающего массажа стоп совмещен с нагревателями и позволяет проводить самый приятный и эффективный массаж стоп.


Ионизация

В кресле используется технология очистки воздуха ионизатором, которая может захватывать вредные вещества в воздухе и очищать его.

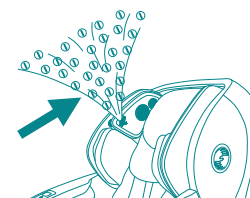

Музыкальная терапия

Рядом с подголовниками расположены динамики. Благодаря соединению кресла и вашего музыкального плеера (смартфона или планшета) по технологии Bluetooth, вы можете синхронизировать движение массажных роликов с ритмом музыки. Массаж под ритм ваших любимых мелодий поможет вам лучше расслабиться или поднять настроение.

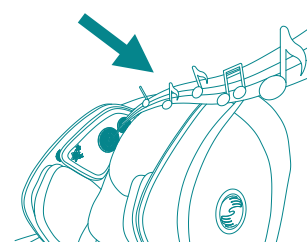

Примечание: Успешное Bluetooth сопряжение с мобильным телефоном или планшетом возможно с поддержкой функции Bluetooth в этих устройствах и под управлением операционной системы Android или iOS. После сканирования доступных Bluetooth устройств, необходимо выбрать из полученного списка в настройках вашего мобильного устройства сопряжение с массажным креслом. После успешного сопряжения вы сможете слушать свою любимую музыку во время массажа через динамики кресла.

Чистка

Перед чисткой массажного кресла убедитесь, что оно выключено, и вилка шнура питания отсоединена от розетки. Никогда не погружайте устройство в воду и не допускайте попадания воды в устройство.

- Смочите мягкую ткань в растворе нейтрального моющего средства, хорошо отожмите и очистите заднюю часть спинки кресла, подлокотники, массажный блок для ног, воздуховоды и другие пластиковые детали. Затем протрите все сухой хлопчатобумажной тканью.
- Очистите пульт управления, провода и корпус блока питания мягкой сухой тканью.
- Смочите мягкую ткань в растворе нейтрального моющего средства, хорошо отожмите и очистите подголовник, подушку спинки кресла, подушку сиденья. Затем вытрите все сухой хлопчатобумажной тканью и дайте креслу высохнуть в хорошо проветриваемом помещении.
- Отсоедините чехлы (внутренние тканевые вкладки) массажного блока для ног и аккуратно постирайте вручную в теплой воде. Не отжимайте и не гладьте чехлы, сушите их только естественным путем.



ВНИМАНИЕ

- При чистке запрещено использовать ярко окрашенные цветные ткани, металлические губки, а также агрессивные моющие средства, такие как бензин, растворители или спирт. Данные материалы и вещества могут изменить цвет поверхности массажного кресла и повредить его.
- Запрещено использовать фен для сушки и утюг для обивки кресла!

Хранение

- Выключите массажное кресло и отсоедините шнур питания от электросети. Рекомендуется хранить устройство в чистом, сухом, прохладном месте, избегая попадания прямых солнечных лучей.
- Если не предполагается использование массажного кресла в течение длительного времени, закройте его защитным чехлом (не входит в комплект поставки).
- Не кладите тяжелые предметы на массажное кресло.
- Срок хранения — не ограничен.

НАПОМИНАНИЕ:

Перед каждым использованием массажного кресла, убедитесь что:

- ✓ отсутствуют посторонние запахи (например, жженой резины или проводки)
- ✓ питание подается на все детали кресла
- ✓ не нагревается шнур питания
- ✓ отсутствуют другие нетипичные признаки



ВНИМАНИЕ

Пожалуйста, при наличии любого из вышеперечисленных признаков прекратите использование массажного кресла, чтобы избежать его повреждения или несчастных случаев. Выключите массажное кресло и отсоедините шнур питания от электросети. Обратитесь в сервисную службу компании-продавца для технического обслуживания или ремонта.

В данном разделе описаны самые распространенные проблемы, с которыми вы можете столкнуться при использовании массажного кресла. Если вы не сможете устранить проблему, используя нижеизложенную информацию, или у вас имеются проблемы, которые здесь не описаны, обратитесь в сервисную службу.

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Кресло не работает после включения питания	Проверьте питание	Нажмите на переключатель
	Не запущен сеанс массажа	Выберите и запустите программу массажа
	Плохой контакт разъема шнура питания и штекера	Проверьте контакт
	Шнур питания, штекер или разъем шнура питания поврежден	Обратитесь в сервисную службу компании продавца
	Сгорел предохранитель	Замените предохранитель
	Неисправность в электросети	Произведите необходимый осмотр и ремонт электросети
Во время работы кресла раздаются звуки и шумы из конструкции кресла	Это может быть звук насоса, мотора или механических частей кресла	Это нормальная работа кресла, не является неисправностью
Левый и правый ролики находятся на разном уровне	Ролики работают попеременно	Не является неисправностью
Звук работающего кресла становится громче	Возможно, это происходит из-за слишком долгой работы кресла	Выключите питание и подождите 30 минут до следующего запуска
	Внутренние элементы трутся друг о друга, не является неисправностью	Обратитесь в сервисную службу компании продавца для диагностики и ремонта
Массаж прекращается во время работы	Произошло отключение электропитания	Возобновите подачу электроэнергии
	Закончилось время программы массажа	Выключите питание и подождите 30 минут до следующего запуска
Массажный блок для ног или спинка кресла не опускаются	Проверьте наличие помех, перегрузок кресла. Иногда, в целях безопасности, массажный механизм может автоматически прекратить работу	Устраните препятствия, выключите питание и подождите 30 минут до следующего запуска
Кресло не возвращается в исходное положение	Слишком долгая работа кресла. Закончилось время программы массажа.	Обратитесь в сервисную службу компании продавца для диагностики и ремонта
Штекер и шнур питания нагреваются	Слишком долгая работа кресла	Выключите питание и подождите 30 минут до следующего запуска
	Сторонний фактор	Прекратите использование кресла и обратитесь в сервисную службу компании продавца

УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТА

Данный продукт нельзя утилизировать с обычными бытовыми отходами! Все электрические или электронные устройства, независимо от того, содержат они токсичные вещества или нет, должны быть утилизированы отдельно в специальном пункте утилизации согласно экологическим нормам и правилам вашего региона. За дополнительной информацией по правильной утилизации обращайтесь в органы местного самоуправления или к дилеру. За неправильную утилизацию данных отходов в соответствии с национальным законодательством может быть назначен штраф.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование продукта: массажное кресло

Название модели: Excellence

Напряжение: AC220-240В/50Гц

Мощность: 280Вт

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный гарантийный талон дает право на бесплатный ремонт массажного кресла «Bodo» дилером в течение 3-х лет со дня продажи изделия.

Перечисленные в этом разделе гарантии являются полным списком предоставляемых гарантий и действуют в случае, если письмо с уведомлением получено авторизованным дилером в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Оно должно содержать изложение неисправности и сопровождаться копиями документов, подтверждающих факт совершения покупки. Гарантия действительна только при наличии товарного чека на приобретенное изделие. На все детали и комплектующие, установленные в ходе гарантийного ремонта, распространяется гарантия на срок, не превышающий остатка срока первоначальной гарантии. Гарантия не распространяется на повреждения и износ обивки кресла.

В случае невозможности провести необходимый ремонт, дилер оставляет за собой право заменить массажное кресло на новое, адекватное по стоимости неисправному массажному креслу на дату приобретения.

Гарантия прекращает свое действие, если ремонт массажного кресла производился кем-либо, кроме дилера или уполномоченного агента.

В случае необходимости доставки кресла в сервисный центр, расходы по транспортировке оплачивает владелец массажного кресла.

При эксплуатации изделия на коммерческой основе или при общественном использовании, срок гарантии сокращается до 1 (одного) года.

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- небрежного хранения или транспортировки
- нарушения правил эксплуатации
- механических повреждений изделия, следов воздействия химических веществ
- ремонтных работ, производимых не сервисным центром
- повреждений или нарушений нормальной работы, вызванных животными или насекомыми
- использования изделия не по назначению
- неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.)
- блокировки подвижных элементов изделия при попадании во внутренние объемы посторонних предметов

Диагностика и ремонт изделия после истечения гарантийного срока осуществляется за счет клиента.

Дата покупки: _____
Наименование товара: _____
Компания-продавец: _____
Адрес продавца: _____
Телефон продавца: _____
ФИО клиента: _____

М.П.

Подпись _____

С правилами эксплуатации, противопоказаниями и рекомендациями ознакомлен.
Претензий не имею.

_____/_____
(подпись) (расшифровка)